

FABRICANTE:  
Optix d.o.o. – Oračka 13  
11080 Zemun – Serbia

EMPRESA PARA LA FABRICACION  
VENTA Y SERVICIO  
DE INSTRUMENTOS OPTICOS Y OPTO-ELECTRONICOS

## LEGENE:

"USADO POR"

"CÓDIGO DE LOTE"

"PRECAUCION, CONSULTE DOCUMENTOS ANEXOS"

"LIMITACIONES DE TEMPERATURA"

# Babytime™

Mini microscopio de observación del ciclo de ovulación

Distribuidor en Canada:



- página 3 -

### Los usuarios de este producto son

1. Parejas que desean tener hijos
2. Parejas que no desean tener hijos
3. Parejas que tienen problemas y deben saber en el período cuando es más posible concebir (esterilidad secundaria)
4. Parejas que desean aumentar la probabilidad de tener el sexo deseado de hijo
5. Mujeres con el ciclo menstrual irregular
6. Parejas que desean tener la vida íntima sin estrés.
7. Mujeres que no quieren utilizar anticonceptivos químicos y no quieren aceptar el riesgo de las influencias nocivas

### Modo de empleo

Por la mañana o durante el día, por lo menos tres horas antes de lavar los dientes, antes de comer o fumar, aplicar la saliva (siempre una gota de la saliva) sin burbujas en el portaobjetivo del ocular.



Imagen 1. retirar la tapa (1)

- página 6 -

### Imágenes B/C

#### La estructura mixta y la estructura de helecho

Unos 3-4 días antes de la ovulación en la muestra seca de saliva empiezan a aparecer las ramitas de helecho (B). En el mismo día de la ovulación la ESTRUCTURA DE HELECHO resulta la más densa (C). En los próximos 2 o 3 días tenemos otra vez la ESTRUCTURA MIXTA (B). Todo este período es el PERIODO DE DIAS FERTILES durante el cual la mujer, si tiene relaciones sexuales, puede concebir.

#### El minimicroscopio Baby Time facilita

- evitar un embarazo no deseado. En el período de aparición de la estructura de puntos, la relación sexual no puede llevar a la concepción mientras a lo largo del período de aparición de la estructura mixta y de helecho hay que usar uno de los anticonceptivos naturales.
- determinar el tiempo más adecuado para la planificación familiar (durante la aparición de la estructura mixta y de helecho es aconsejable tener relaciones sexuales con más frecuencia)
- determinar los días fértiles en la esterilidad secundaria la aparición de un helecho más denso en la muestra corresponde al día de la ovulación (se recomienda la relación sexual)

#### Limitación de Responsabilidad

El distribuidor no es responsable o sujeto de acción legal debido a uso impropio o interpretación incorrecta de los resultados. Baby Time debe ser usado solo como indicador de fertilidad y no como medida anticonceptiva. Este producto no es un anticonceptivo.

#### Qué es el Baby Time?

El minimicroscopio ovulatorio **Baby Time** es un aparato médico diagnóstico personal para el uso diario que facilita determinar de una manera fácil y rápida los días fértiles e infértiles en el ciclo menstrual de la mujer. Debido a la cantidad aumentada de los estrógenos durante los días fértiles, en la saliva aumenta la cantidad de sales. Por un sistema óptico que aumenta 52 veces, en la muestra seca de saliva, los cristales de sal obtienen la forma de "las hojas de helecho".

#### Cuándo es posible concebir?

Se entiende por ciclo menstrual el tiempo entre el primer día de la regla hasta el primer día de la regla siguiente. En la mitad del ciclo ocurre la ovulación - maduración del óvulo. Al mismo tiempo madura la epidermis mucosa del útero que está en condición de recibir el óvulo fecundado.

Las características biológicas del óvulo demuestran que es posible concebir en un período determinado del ciclo que corresponde a la ovulación. Teniendo en cuenta que el óvulo tiene una capacidad de fecundación que dura como máximo 48 horas después de la ovulación y que los espermatozoides mantienen su capacidad de fecundación durante 4 días después de la eyacuación, se estima que el PERIODO DE FERTILIDAD es de 6 días en la mitad del ciclo. (ver diagrama)

FIABILIDAD 96-98%

- página 4 -



Imagen 2. sacar el ocular (2) de su caja (3)



Imagen 3. Limpiar con mucho cuidado el portaobjetivo del ocular (2.2) con un trapo limpio



Imagen 4. Aplicar con el dedo la muestra de saliva (sin burbujas) en el portaobjetivo, colocar el ocular en una superficie plana y dejarla que se seque durante 10-15 minutos

- página 7 -

### Notas importantes para el uso

- En el análisis de la saliva pueden influir de manera negativa la infección aguda, la inflamación bucal, los restos de la comida, el alcohol, los medicamentos y los cigarrillos.
- Por las razones higiénicas y de salud se recomienda el uso individual del aparato.
- No sumergir el aparato en el agua, protegerlo del polvo, de la humedad y de las temperaturas altas.
- La muestra de saliva tiene que estar completamente seca.
- El fabricante y el distribuidor no asumen la responsabilidad en caso del uso inapropiado y en caso de la interpretación errónea de los resultados.

### Recambio de pilas

Retirar la tapa. Girar la caja de la iluminación (4) a la izquierda y sacarla de la caja del microscopio. Sacar y cambiar dos pilas SR44, (4.2) con el polo positivo para arriba. Volver a colocar la iluminación en la caja del microscopio y girar a la derecha.


### Garantía

**Baby Time** tiene garantía condicional. La garantía aplica solo para productos defectuosos.

El reemplazo de productos defectuosos está garantizado dentro de los 12 meses de la fecha de compra.

- página 2 -

### Diagrama del ciclo menstrual (28 días)

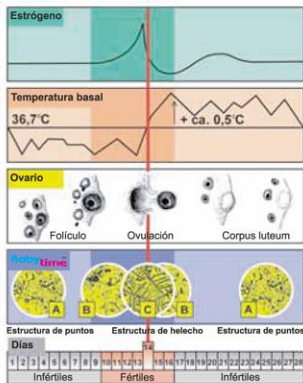


EL PLAZO DE VALIDEZ DE LOS RESULTADOS - 24 Horas

- página 5 -



Imagen 5. Volver a colocar el ocular en su caja y acercar el microscopio al ojo. Con el dedo de una mano encender la luz mediante el interruptor (4.1) y a la vez enfocará la imagen con los dedos de otra mano girando una parte del ocular (2.1)

Con el minimicroscopio **Baby Time** se puede notar una de las tres imágenes

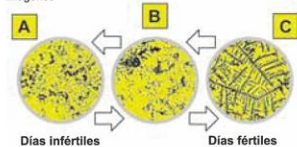

#### Imagen A (estructura de puntos)

Desde el primer día de la menstruación hasta 3-4 días antes de la ovulación y en un período que empieza 2-3 días después de la ovulación y dura hasta el comienzo de la siguiente menstruación, la muestra seca de saliva va recibiendo una ESTRUCTURA DE PUNTOS sin forma determinada. Se trata de UN PERIODO DE DIAS INFERTILES en el que la mujer no puede quedarse embarazada.

- página 8 -

### Las partes del Baby Time



#### Características técnicas

Aumento - 52X  
Pilas - 2x SR44, 1.5V  
Fuente de luz - LED diodo  
Capacidad de enfocar la imagen - +/- 5dioptrías

Resolución - 460lin/mm  
Peso - 19gramos  
Dimensiones - 21x73mm  
Material - ABS plástico